



Suction Clean

Zusatzreiniger für dentale Absauganlagen

- hohe Reinigungskraft
- schaumarm



Präparatetyp

Schaumarmes Reinigungskonzentrat für dentale Absauganlagen.

Zusammensetzung

Organische Säuren, Komplexbildner, Korrosionsschutz, Lösungsvermittler.

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen des Konzentrates: klare, gelbliche Lösung
 pH-Wert: ca. 1,7 +/- 0,5
 Dichte (20°C): ca. 1,058 g/ml

Anwendungsgebiete

Zur regelmäßigen, zusätzlichen Reinigung von dentalen Absauganlagen, Mundspülbecken und Abflussschläuchen.

Anwendung

SafeLine Suction Clean ein- bis zweimal wöchentlich anwenden. Je nach Verschmutzungsgrad 50 ml bis 100 ml SafeLine Suction Clean auf 1 Liter auffüllen. Zur Reinigung 2 Liter Lösung frisch ansetzen (Reinigung z.B. in der Mittagspause durchführen). 2/3 der gebrauchsfertigen Lösung durch die Saugschläuche saugen, 1/3 der Lösung ins Mundspülbecken kippen. Nach Ablauf der Einwirkzeit mit klarem Wasser nachspülen. Die Reinigungslösung nicht über Nacht in der Anlage stehen lassen.

Dosierung/Einwirkzeiten

Je nach Verschmutzungsgrad: 5 - 10% bei einer Einwirkzeit von 1,5 bis 2 Stunden

Lieferformen

Einzelpackung 5 Liter Kanister	Verkaufseinheit 1 x 5 L	Ref.-No. 09982
-----------------------------------	----------------------------	-------------------

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:



Gefahr.
 Verursacht schwere Verätzungen der Haut. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTIN-FORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.