

Gebrauchsanweisung zur Reinigung und Sterilisation

- 1) Legen Sie die Instrumente in eine Lösung mit neutralem PH-Wert für 20 min rein.
- 2) Spülen Sie die Instrumente unter fließendem Wasser für 3-5 min ab.
- 3) Sterilisieren Sie die Instrumente wie gewohnt unter Einhaltung der Anweisungen des Herstellers.

Achtung!!!

- 1) Verwenden Sie bitte keine Lösungen mit einem hohen Anteil Chlor oder Oxal Säure.;
- 2) Belassen Sie die Instrumente unter keinen Umständen für länger als 3 Stunden in der Lösung.